

特許取得済

いつものマスクを快適に!

不織布マスク専用

息スルーアルファ

ズレ防止

マジックテープ付

消臭^{生地使用}

話しやすい

化粧が
落ちにくい

息苦しさ
から解放

息がしやすい!

折りたためて
コンパクト!


洗って
何度も使える!

空間キープインナーマスク

空間キープインナーマスク
息スルー



息スルーは使い捨てマスクまた、
今お持ちのマスクに付けるだけで、
マスク内の空間を確保、
肌とマスクが密着しないので
さらっとして呼吸がしやすい
インナーマスクです。
ダブルワイヤー構造により
マスク内が暑く
マスクが外しにくいシーンなどに
空間を調整できるので便利です。

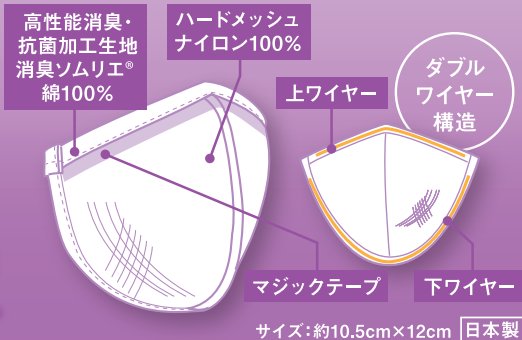

繰り返し
洗濯しても
**効果が
持続!**


消臭(減少率)	洗濯前	洗濯10回後
アンモニア	98	92
イソ吉草酸	98	98
酢酸	99	≥99
イネナール	92	91

抗菌(減少率)	洗濯前	洗濯10回後
肺炎がん菌	99	99
黄色ブドウ球菌	99	99
モラクセラ菌	99	99

【消臭 試験方法】●繊維評価技術協議会●SEKマーク繊維製品認証基準●21.消臭性試験(検知管法、ガスクロマトグラフ法) 【抗菌 試験方法】JIS L 1902菌液吸収法

使い方

お使いのマスクの内側に置いて、自身の心地よい位置でセットしてマスクをつけてください。

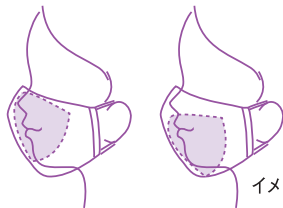

使用上の注意

- 本品はフィルター機能はありません。
- 万一、かゆみかぶれ等の症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用中、気分が悪くなった場合には使用を中止してください。
- 環境や個人差などにより、眼鏡がくもることがありますので、運転の際などは十分に注意してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 高温多湿な場所での保管は避けてください。
- 臭いの強い製品の近くで保管しないでください。

洗濯方法



やさしく手洗いのうえ絞らずに形を整えて陰干ししてください。

品名	インナーマスク 息スルー アルファ レギュラーサイズ		
素材	メッシュ:ナイロン、バイアス:綿、ワイヤ:ポリエチレン		
包装材	ポリプロピレン	入数	1
		原産国	日本
販売者名	山一株式会社 〒550-0001大阪市西区土佐堀1-4-11 https://www.yamaichi-web.jp/items/innermask/		

